

INSTRUÇÃO DE USO***DUPLA AÇÃO: lubrificante e osmoprotetor da superfície ocular*****optive[®]**
UD**SEM CONSERVANTE****Solução Oftálmica Estéril****APRESENTAÇÃO:**

A solução oftálmica estéril - OPTIVE[®] UD está acondicionada em caixas contendo 30 flaconetes plásticos com 0,4 ml para via de administração tópica ocular.

COMPOSIÇÃO:

OPTIVE[®] UD contém: glicerina; carmelose sódica; eritritol; levocarnitina; ácido bórico; borato de sódio decaidratado; citrato de sódio diidratado; cloreto de potássio; cloreto de cálcio diidratado; cloreto de magnésio hexaidratado e água purificada.

As substâncias contidas na emulsão de OPTIVE[®] UD lhe conferem características muito próximas da lágrima natural e foram escolhidas para proporcionar máximo conforto para os olhos. A formulação é livre de conservantes e apresenta um pH alvo de 7,3, que foi escolhido por se aproximar ao pH da lágrima humana para proporcionar melhora do desconforto ocular e também agir como protetor contra as irritações oculares. Os componentes levocarnitina e eritritol agem como osmoprotetores do epitélio corneano.

INDICAÇÕES

OPTIVE[®] UD é uma formulação de dupla ação: lubrificante e osmoprotetor da superfície ocular, proporcionando alívio da ardência, irritação, secura ocular, sensação de areia e corpo estranho que podem ser causados por poeira, fumaça, sol, vento, ar seco, ar condicionado. Age também como protetor contra as irritações oculares.

OPTIVE[®] UD é indicado também no uso pós-operatório de cirurgias de correção visual - LASIK (laser assisted in-situ keratomileusis).

CONTRA-INDICAÇÕES

OPTIVE[®] UD é contra-indicado para pacientes que apresentem alergia a qualquer um dos componentes da fórmula.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

O uso do produto é exclusivamente externo.

A solução contida no flaconete deve ser utilizada imediatamente após sua abertura e o conteúdo do flaconete deve ser descartado imediatamente depois do uso do produto. Não permitir que a ponta do flaconete encoste ao olho durante a aplicação nem em qualquer outra superfície depois de aberto para que não ocorra contaminação da solução.

OPTIVE[®] UD pode ser utilizado durante o uso de lentes de contato.

Se for utilizar este produto concomitantemente com outras formulações oculares, aguarde um intervalo de 5 minutos entre as aplicações de cada formulação.

A aplicação do lubrificante em geral não causa alterações da visão. Caso ocorra leve borramento da visão logo após a aplicação, recomenda-se aguardar até que a visão retorne ao normal antes de dirigir veículos ou operar máquinas.

Em caso de dor ocular, alterações da visão, irritação e vermelhidão ocular persistentes, ou se os sintomas piorarem ou persistirem por mais de 72 horas, recomenda-se que o uso do produto seja descontinuado e que se procure orientação médica.

Manter fora do alcance de crianças.

EVENTOS ADVERSOS

OPTIVE[®] UD é geralmente bem tolerado, podendo causar embaçamento temporário da visão após a instilação, devido à sua viscosidade. Outros eventos adversos que podem ocorrer são: sensação de pontadas nos olhos, ardor, dor, prurido, irritação e vermelhidão ocular, visão turva, sensibilidade à luz e ceratite puntacta.

MODO DE USO

OPTIVE® UD é uma solução límpida, incolor. Não deve ser utilizado se a solução mudar de coloração e deve ser usado exclusivamente nos olhos. Não utilizar OPTIVE® UD caso haja sinais de violação e/ou danificações do flaconete. Assegurar-se de que o flaconete está intacto antes de usar.

Para abrir, girar totalmente a ponteira, não puxar.

OPTIVE® UD pode ser utilizado durante o uso de lentes de contato.

Não encostar a ponta do flaconete nos olhos, nos dedos e nem em outra superfície qualquer, para evitar a contaminação do flaconete e da solução.

Delicadamente, puxar a pálpebra inferior para baixo até formar uma pequena bolsa.

Aplicar 1 a 2 gotas nos olhos, tantas vezes quantas necessárias.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E USO

OPTIVE® UD não requer condições especiais para armazenamento, deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°).

O prazo de validade de 18 meses encontra-se impresso na embalagem externa. Não utilize após a data de vencimento.

Produto Estéril pelo Método de Filtração.

Resp.Téc.: Flávia Regina Pegorer - CRF SP 18.150

Registro ANVISA nº 80143600093



Qualidade e Tradição a Serviço da Oftalmologia

Fabricado por:

Allergan Pharmaceuticals Ireland
Westport - Irlanda

Importado e Distribuído por:

ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
Av. Guarulhos, 3272 - CEP: 07030-000 - Guarulhos - SP
CNPJ: 43.426.626.0009-24

® Marca Registrada

72329BR10A - Laetus: 237

Serviço de Atendimento ao Consumidor

0800-144077

Discagem Direta Gratuita