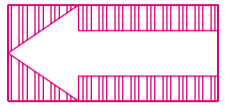

 **NÁVOD K POUŽITÍ**





Jedinečné složení přípravku pro okamžitou úlevu, dokonalý dlouhotrvající komfort a soustavnou ochranu před příznaky suchého oka.

Sodná sůl karboxymethylcelulosity a hyaluronát sodný, látky obsažené v přípravku OPTIVE Fusion™, tvoří kombinaci, která působí synergicky na zmírnění příznaků suchého oka. Kyselina hyaluronová je účinný oční lubrikant, který napomáhá udržovat stabilitu slzného filmu.

Duální účinek - lubrikační a osmoprotektivní - vede k zajištění komfortu.

Popis
OPTIVE Fusion™ je vícedávkový sterilní roztok, který obsahuje hyaluronát sodný 0,1%, sodnou sůl karboxymethylcelulosity 0,5%, glycerin 0,9%, erytritol, kyselinu boritou, dekahydrát tetraboritanu sodného, dihydrát natrium-citrátu, chlorid draselný, dihydrát chloridu vápenatého, hexahydrát chloridu hořečnatého a konzervační činidlo PURITE® 0,01%, které se v oku rozkládá na přirozené složky slz.

OPTIVE Fusion™ lze používat společně se všemi druhy kontaktních čoček a přípravek je možné používat až 6 měsíců po otevření.


Návod k použití
Podle potřeby nakapejte do oka (očí) 1 nebo 2 kapky.

Upozornění


- Nepoužívejte, pokud jste alergičtí na kteroukoli složku přípravku.
- Roztok nepolykejte.
- Aby nedošlo ke kontaminaci nebo případnému poranění oka, nedotýkejte se zakončením lahvičky žádného povrchu a vyvarujte se přímého kontaktu s okem.
- Lahvičku po použití ihned dobře uzavřete.
- Po uplynutí 6 měsíců od prvního otevření lahvičky zlikvidujte veškerý zbývající roztok.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na přípravku.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Uchovávejte při pokojové teplotě.
- Nepoužívejte lahvičku, pokud byl před prvním použitím narušen uzávěr chránící před manipulací, který se nalézá na hrdle lahvičky.
- Nepoužívejte, pokud došlo ke změně barvy roztoku.
- Mezi podáním očních přípravků ponechte odstup 5 minut.

Varování
Přestaňte přípravek používat a vyhledejte svého očního lékaře, pokud pocítíte bolest očí, změny vidění, přetrvávající začervenání nebo podrážděné oči nebo pokud se stav zhorší.



Obsah
OPTIVE Fusion™ se dodává v plastových lahvičkách o obsahu 3 ml, 10 ml nebo 15 ml.


 Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castelbar Road
Westport, Co. Mayo
Irsko


Datum revize: 19.08.2015


 **ALLERGAN**

© 2015 Allergan, Inc.
™ marks owned by Allergan Inc

 0459 

 **NÁVOD NA POUŽITIE**





Jedinečné zloženie prípravku je zdrojom okamžitej úľavy, dokonalého dlhotrvajúceho komfortu a dlhodobej ochrany od príznakov suchého oka. Sodná soľ karboxymethylcelulózy a kyselina hyalurónová, látky obsiahnuté v OPTIVE Fusion™, tvoria kombináciu, ktoré efektívne spolupôsobia k zmierneniu príznakov suchého oka. Kyselina hyalurónová je účinný očný lubrikant, ktorý napomáha udržiavať stabilitu slzného filmu. Duálny účinok - lubrikačný a osmoprotektívny vedie k zabezpečeniu komfortu.

Popis:
OPTIVE Fusion™ je viacdávkový sterilný roztok, ktorý obsahuje hyaluronát sodný 0,1%, sodnú soľ karboxymethylcelulózy 0,5%, glycerín 0,9%, erytritol, kyselina boritá, dekahydrát boritanu sodného, dihydrát citrátu sodného, chlorid draselný, dihydrát chloridu vápenatého, hexahydrát chloridu hořečnatého a konzervačné činidlo PURITE® 0,01%, ktoré sa v oku rozkladá na prirodzené zložky slz.

OPTIVE Fusion™ možno používať spolu so všetkými druhmi kontaktných šošoviek a prípravok je možné používať až 6 mesiacov po otvorení.


Návod na použitie
Podľa potreby nakvapkať do oka (očí) 1 alebo 2 kvapky.


Upozornenie

- Nepoužívajte, pokiaľ ste alergický na ktorúkoľvek zložku prípravku
- Roztok neprehltajte
- Aby nedošlo ku kontaminácii alebo k prípadnému poraneniu oka, nedotýkajte sa zakončením fľaštičky žiadneho povrchu a vyvarujte sa priameho kontaktu s okom
- Fľaštičku ihneď po použití dobre uzatvorte
- Po uplynutí 6 mesiacov od otvorenia zlikvidujte všetok zvyšný roztok
- Nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti uvedeného na prípravku
- Uchovávejte mimo dosahu detí
- Uchovávejte pri izbovej teplote
- Nepoužívajte fľaštičku, pokiaľ bol pred prvým použitím narušený uzáver chrániaci pred manipuláciou, ktorý sa nachádza na hrdle fľaštičky
- Nepoužívajte, pokiaľ došlo k zmene farby roztoku
- Medzi podaním iných očných prípravkov nechajte odstup 5 minút



Varovanie
Prestaňte prípravok používať a vyhľadajte svojho očného lekára, pokiaľ pocítite bolesť očí, zmeny videnia, pretrvávajúce začervenanie alebo podráždene oči, alebo pokiaľ sa stav zhorší

Obsah
OPTIVE Fusion™ sa dodáva v plastových fľaštičkách s obsahom 3 ml, 10 ml alebo 15 ml

 Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road
Westport, Co. Mayo
Írsko

 **ALLERGAN**

© 2015 Allergan, Inc.
™ marks owned by Allergan, Inc.

 0459  72652CZ12

INSERT, TYPE B 3,

PENCIL FOLD,

265mm X 114mm,

FOLDED TO 114mm X 23mm

0106601