

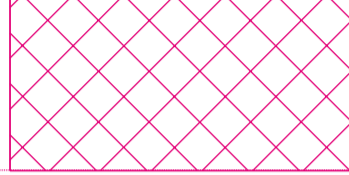
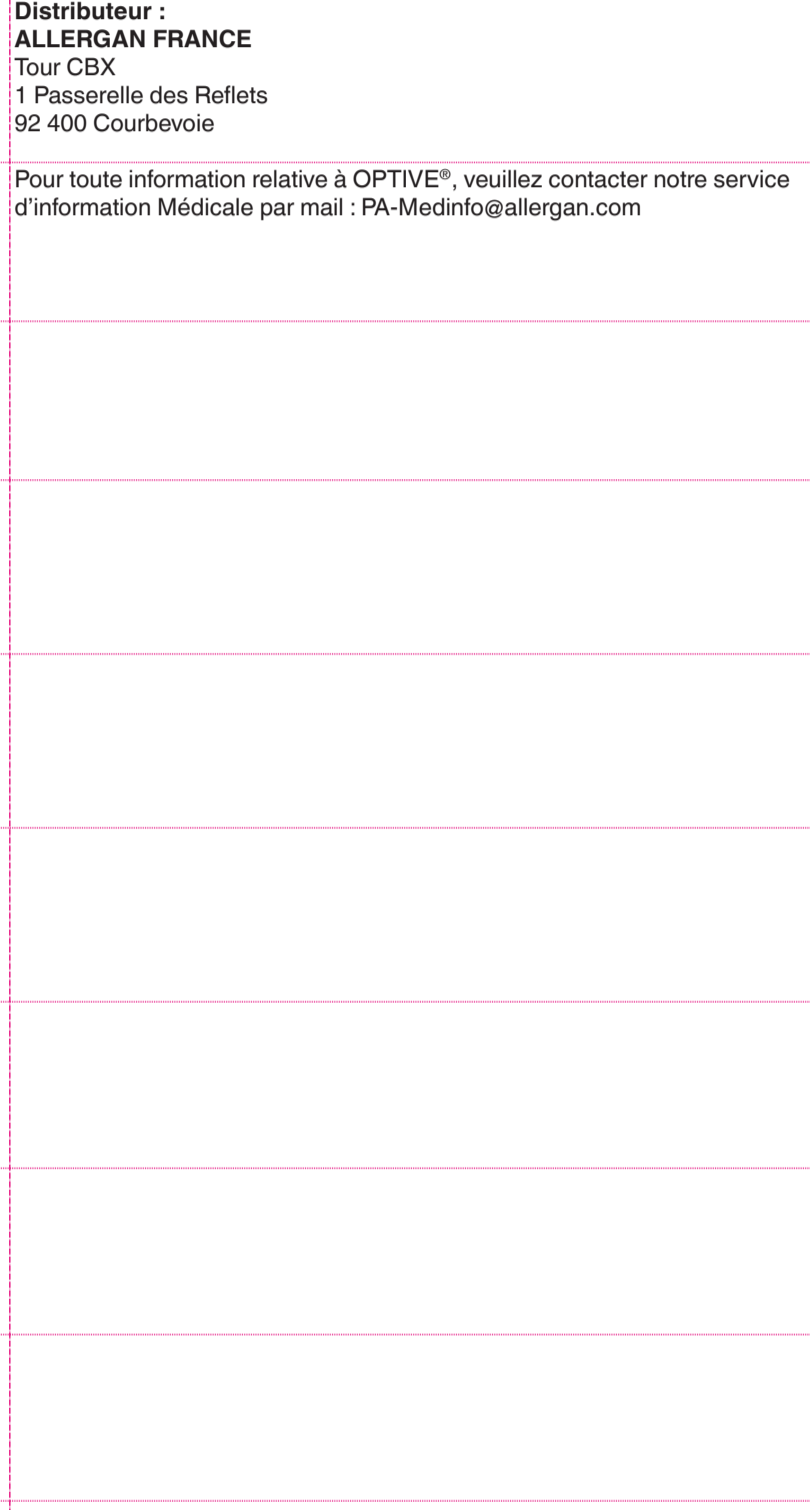
 optive[®] Solution de confort double action, lubrifiante et osmoprotectrice	
La formule unique double action d'OPTIVE [®] procure un confort durable. OPTIVE [®] lubrifie la surface de l'œil et hydrate les cellules de la surface de l'œil en rétablissant l'équilibre osmotique naturel.	
Description	
OPTIVE [®] est une solution stérile présentée en flacon multidose qui contient de la carboxyméthylcellulose de sodium, de la glycérine, de la L-carnitine, de l'érythritol et un conservateur, le PURITE [®] qui se dissout en composants naturels des larmes de l'œil. OPTIVE [®] est compatible avec le port de toutes les lentilles de contact.	
Mode d'emploi Instiller 1 ou 2 gouttes dans l'œil/les yeux en fonction des besoins.	
Précautions	
<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas utiliser le produit si vous êtes allergique à l'un des composants. • Ne pas avaler la solution. • Pour éviter toute contamination ou une éventuelle lésion de l'œil, ne pas mettre l'embout du flacon en contact avec quelque surface que ce soit, et éviter tout contact direct avec l'œil. • Fermer soigneusement le flacon immédiatement après utilisation. • Jeter tout flacon entamé 90 jours après ouverture. • Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur le flacon. • Tenir hors de la portée des enfants. • Conserver à température ambiante. • Ne pas utiliser le flacon si l'opercule d'inviolabilité fixé sur le bouchon est endommagé avant la première utilisation du produit. • Attendre 5 minutes entre l'administration d'OPTIVE[®] et celle d'autres produits ophtalmiques. 	
Mises en garde Arrêtez d'utiliser OPTIVE [®] et consultez votre médecin, si vous ressentez une douleur de l'œil, des changements dans votre vision, une rougeur continue ou une irritation de l'œil ou si les symptômes de la sécheresse oculaire s'aggravent.	
Présentation OPTIVE [®] est présenté dans des flacons en plastique de 3 ou 10 ml de solution.	
 ALLERGAN SALES, LLC 2525 Dupont Drive, Irvine CA 92612 USA	
EC REP ALLERGAN PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED Clonshaugh Business & Technology Park Dublin 17 D17 E400 Irlande	
72469FP14	

	
	
Distributeur : ALLERGAN FRANCE Tour CBX 1 Passerelle des Reflets 92 400 Courbevoie	
Pour toute information relative à OPTIVE [®] , veuillez contacter notre service d'information Médicale par mail : PA-Medinfo@allergan.com	
	
STERILE A CE 0344 Version n° 8 